

かんたん止血で看護師さん達の作業時間短縮 絆創膏 クイックバン

**内容・サイズ
使用方法**

一般医療機器



添付文書の一部から抜粋しております。「使用上の注意」をよく読んでからご使用下さい。

再使用禁止

【使用目的又は効果】

注射、採血、点滴、関節穿刺などの処置後の穿刺部位や傷口の保護



こちらの2次元コードより
製品の添付文書を
確認いただけます。

内容・サイズ

2サイズ(S・M)



Sサイズ
20mm×20mm
パッドサイズ
(8mm×8mm)
1,000回
※(10回×10枚)×10袋

Mサイズ
27mm×27mm
パッドサイズ
(13mm×13mm)
500回
※(10回×10枚)×5袋

使用上の注意

- ・本製品の使用により皮膚に異常(発疹、赤み、痒みなど)が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
- ・滅菌包装に損傷や汚れ、水濡れがある場合は使用しないでください。
- ・使用中は水などで濡らさないようにしてください。

使用方法

処置部位にパッドを当てて貼り付けてください。

サイドから
剥がす



ゆっくりとサイドから
剥がしてください

裏面も
シールになってます



裏面もシールになっているので机や
手の甲に止められます