

機械器具 48 汎用注射筒
汎用注射筒(JMDN コード 13929001)一般医療機器
シジエムシリンジ(針なし)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

本品は外筒、押子、ガスケットからなる。

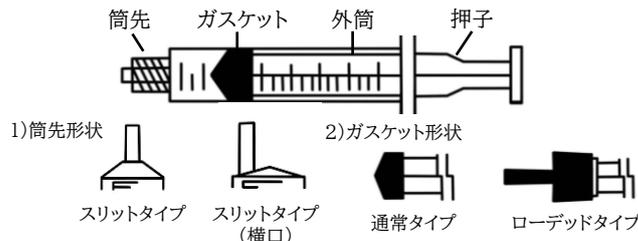

<材質>

外筒・押子	ポリプロピレン
ガスケット	スチレン系熱可塑性エラストマー

【使用目的または効果】

本製品は、主に注射や採血などの医療行為に使用される器具です。

【使用方法等】

包装を開封し、注射器を無菌状態で取り出してください。

[使用方法等に関する使用上の注意]

- ・包装が損傷や汚れている場合、または製品に異常が見られる場合は使用しないでください。
 - ・開封後はすぐに使用し、使用後は感染予防に配慮して適切に廃棄してください。
 - ・本製品のルーア接続部は確実に接続し、漏れなどの異常がないか必ず確認してください。
 - ・他の医療機器と接続する際は、以下の点に注意してください
- 1) 過度な締め付けは避けてください。注射器先端の破損や空回りにより、液漏れや空気混入の可能性があります。
 - 2) テーパー部分に薬液や血液を付着させないでください。接続部の緩みや空回りにより、液漏れや空気混入の可能性があります。
 - 3) メスコネクターと接続する際、横方向に力を加えないでください。注射器先端の変形や破損により、液漏れや空気混入の可能性があります。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・併用する医療機器および医薬品の添付文書を確認してから使用してください。

- ・使用中は本製品の破損、接続部の緩み、薬液漏れなどを定期的に確認してください。

- ・接液部の汚染を避けてください。

- ・本製品の再滅菌は行わないでください。

- ・外筒の印刷部分を強くこすらないでください。また、印刷部分に薬液が付着した状態で放置しないでください。目盛が消える恐れがあります。

- ・シリンジポンプへの適用は確認していません。シリンジポンプに使用する場合は、必ずポンプメーカーに適用可否を確認してください。

- ・使用後は医療機器廃棄物として適切に処理してください。

- ・以下のような有害事象が発生した場合は、直ちに適切な処置を行ってください:

- 1) 不適切な取り扱いや使用方法による血管、神経、軟部組織、筋肉の損傷
- 2) 感染症
- 3) 空気の混入

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

<有効期間>

外箱に記載されています。

【製造販売業者情報】

製造販売:CGM Innovation株式会社

[お問い合わせ先]

CGM Innovation株式会社

〒136-0071東京都江東区亀戸3丁目24番7号

TEL: 03-6811-2345

受付:平日10:00~18:00